



DB TAKTIL d.o.o.
Rabrenovački put br. 3.
31330 PRIBOJ, SRBIJA
+381 33 24 45 719
+381 64 15 34 804 (VIBER)
kancelarija@taktilnestaze.rs

INDUKCIONA PETLJA DBT-CTC-121

Indukciona petlja, takođe poznate kao slušna petlja je često najpraktičnije, najjeftinije rešenje, bez potrebe održavanja, koje omogućava kvalitetan pristup osobama sa oštećenim slušom.

Jednom instalirana, ona predstavlja trajno rešenje, bez dodatnih troškova održavanja. Uz njenu instalaciju, nije potrebna instalacija dodatnog prijemnika (receiver), jer slušni aparati već sadrže u sebi prijemnik (receiver). Neophodno je samo da osobe sa oštećenim slušom podese svoj slušni aparat na poziciju T (T-position) i da uživaju u kristalno jasnom zvuku, izolovanom od okolne buke i šumova.

PINCIP RADA

Većina slušnih aparata ima ugrađeni T-kalem (T-coil), mali bežični prijemnik, pored običnog mikrofona. Kada struja prolazi kroz žicu (kabl petlje), oko nje se generiše magnetno polje. Ako se kalem (T-coil u slušnom aparatu) dovede u ovo magnetno polje, stvara se odgovarajuća struja. Tehničkim jezikom, struja se indukuje u drugoj žici, pa otuda i termin "indukciona petlja".

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Indukciona petlja DBT-CTC-121

sastoji se od:

1. samolepljive nalepnice sa T simbolom (slika1);
2. pojačivača indukcione petlje **DBT-CLS-1** (slika2)
2. mikrofona indukcione petlje **DBT-M-2** (slika3);
3. podloge indukcione petlje (**loop pad**) (slika 4).



slika 1



slika 2



slika 3



slika 4

1. Nalepnica za označavanje prostorija sa ugrađenom indukcionom petljom kako bi posetoci bili svesni da je instaliran sistem pristupačnosti osobama sa oštećenim slušom dimenzije 80x80x1mm (slika1).

Tehnički list

Indukciona petlja




Šifra: DBT-CTC-121

2. DBT -CLS-1 (slika 2) predstavlja kompaktan i moćan pojačivač indukcione petlje, pogodan za blagajne, informacione šaltere i za domove. Omogućuje kristalno jasan zvuk, **dimenzija 150x92x25mm, težine 395g**. Poseduje točkić kojim se podešava jačina zvuka, kontrola basa i visokih tonova. Čvrsto metalno kućište sa efikasnim hlađenjem omogućuje dugotrajnu upotrebu. Pokriva površinu do **50m2**. Operativna temperatura u suvoj klimi -40°C do 80°C, u vlažnoj klimi -40°C do 55°C. Temperatura skladištenja -40°C do 80°C. Poseduje tri ulaza **line, mic/line, mic**. Takođe poseduje zaseban ulaz za slušalice. Plave led diode omogućavaju indikaciju jačine signala i priključka za napajanje.

3. DBT-M-2 (slika 3) je mali i elegantni mikrofon sa gušćijim vratom, posebno prikladan za situacije na pultu. Visoka osetljivost mikrofona obezbeđuje dobar nivo govora, čak i ako govornik nije blizu i/ili direktno ispred mikrofona. Opseg frekfencija 50-18000Hz. **Dimenzijsi- osnova Ø 80 mm / H 270 mm. Težina -320g.**

4. Podloga indukcione petlje (loop pad) (slika 4) izrađeno je od tanke ali otporne sive tkanine, površine 400x400x5mm. Pogodno za tezge, stolove, blagajne. Montira se pomoću dvostrano samolepljivih traka ili pomoću heftalice za drvo.

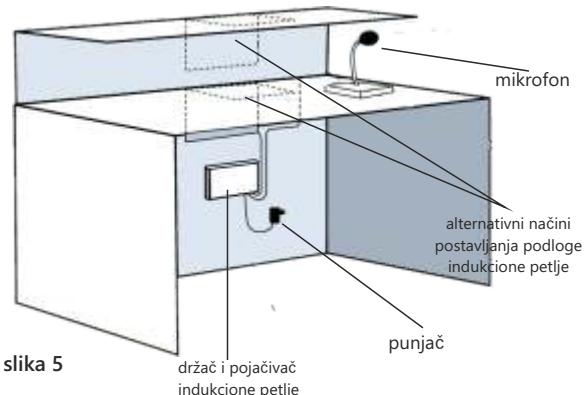

INSTALACIJA:

-Izabrati pogodno mesto za pojačivač indukcione petlje, uvezši u obzir da će biti povezan sa indukcionom podlogom, mikrofonom i punjačem. Ukoliko je potrebno, pričvrstiti i držać pojačivača indukcione petlje kao na slici iznad (slika 5).

-Mikrofon postaviti na pogodno mesto, kako bi osoblje moglo njim da upravlja iz uobičajenog stojećeg ili sedećeg položaja. Kabl mikrofona postaviti na takav način da može nesmetano dosegnuti do pojačivača indukcione petlje.

-Podlogu indukcione petlje postaviti ispod stola, u ugлу izmedju prednje i gornje strane stola (slika5).

Obračunska jedinica se formira po komadu indukcione petlje **DBT-CTC-121**